


STICHTING ARKADA NEDERLAND

Casus UNIBRACE



In iedere nieuwsbrief willen we een casus met jullie bespreken over een UniBrace of Arkada behandeltraject. Zodat je steeds weer nieuwe ideeën krijgt hoe je een bepaald probleem aan zou kunnen pakken. Heb jij zelf een interessante casus? Dan ben je van harte welkom die met ons te delen. Stuur je foto's en de casus gegevens naar info@stichtingarkadanederland.nl o.v.v. casusbespreking nieuwsbrief.

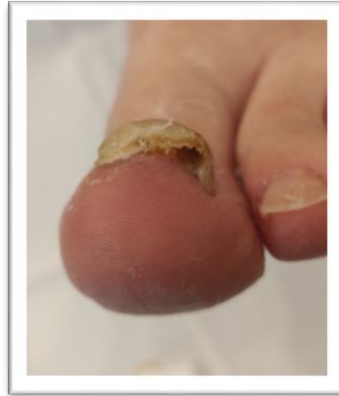

Deze keer een casus van een praktisch helemaal aangetaste nagel.

Ik krijg vaak de vraag, hoever moet ik dat weghalen? Nou heel erg ver. Je freest echt alles weg dat verkleurd is, wit of bruin of welke kleur dan ook, wat los zit. Alles dat dus niet meer functioneel is.

Dat kun je uiteraard doen met de nattechniek. Maar als je van plan bent om direct regulatie toe te passen, dan is dat geen goed idee. Immers is

vocht een van de grootste vijanden als je een kunstproduct wilt gebruiken. Denk aan de 3 V's. Vocht – Vuil – Vet.

Frees dus droog en zoals je ziet kan dat zelfs als je zover moet gaan. Ik gebruik hiervoor een combinatie van een keramische frees, of bijvoorbeeld een tungstenfrees en een rvs-bolkopje met vertanding. Je haalt eerst de bulk weg, wat ik ook wel met een kleine nageltang doe waar ik maar kan. Dan frezen en het nagelbed frees ik na met dat bolkopje. Alles op een iets lager toerental en rustig vanaf 1 kant, niet te veel heen en weer, omdat het nu eenmaal iets warmer kan voelen dan met de nattechniek. Je zult zien, als je dit oefent dat eigenlijk alles heel goed droog kan, als je het maar rustig doet.

Dan heel goed schoonmaken en daarvoor laat ik een paar seconden Aarkada TT-Sept inwerken. Peuter goed alle hoekjes, randjes en gaatjes schoon. Ik heb de nagelwal opzij getapet, zodat ik minder snel tegen haar huid kom met de freesjes en mijn excavator. Het geeft ook een goed beeld van de volle zijkant van de nagel. Om de tape goed te laten hechten, gebruik ik Aarkada Skin Cleaner. Echt ideaal!!

Tip; Ook erg fijn om een erg van (wond)vocht doordrongen nagel droger te maken. Dan gebruik ik er een microborsteltje voor.



Zoals je ziet, begint deze nagel al ver proximaal te tunnelen. Doordat de nagel zo losligt door de vervorming is het ook een ideale ingang voor schimmels, bacteriën en ander gespuis wat er niet hoort. Daarom heb ik er met de klant voor gekozen de nagel te reguleren.



Dat heb ik gedaan met een Mini M, die aan beide kanten op de nagel is geplakt met composiet. De nagel ziet zo vast aan het nagelbed, dat er echt geen haakje onder kon. Daarbij komt dat mevrouw een lichte neuropathie heeft en al op leeftijd is, dus loop ik liever geen risico's.

Overigens is het hele traject echt haar keuze ondanks haar leeftijd! Ze houdt van verzorgde nette nagels en heeft er haar hele leven al problemen mee. Ze vindt het fijn dat ik het eens in de zoveel tijd weer recht kan breien. Ze heeft dit dus al vaker gedaan in de afgelopen 15 jaar dat ze bij. Mij komt.



Het idee van de beugel is dat deze de tunnel weer rechter maakt. Dan komt de nagel platter op het nagelbed te liggen en kan weer hechten. De onycholyse verminderd en de bacterie etc., heeft geen ingang meer. Uiteraard druppelt ze thuis met Aarkada 08Oil.

Ik zal jullie op de hoogte houden van de voortgang van deze casus. Ik ben zelf ook benieuwd of het weer gaat lukken.

